


## PCC<sup>®</sup> 气体在线过滤器

### 适用范围：

连接在气瓶与胚胎培养箱之间，有效去除供气管道中的VOC（挥发性有机化合物）、CAC（化学空气污染物）等污染物。

### 产品特点：

1. 十万级洁净车间生产、无菌产品。
2. 采用高品质活性炭，更有效吸收VOC污染物。
3. 含HEPA过滤器，有效过滤悬浮颗粒。
4. 特殊快速接头，易于安装更换。
5. 经济耐用，使用时间长达3-6个月。

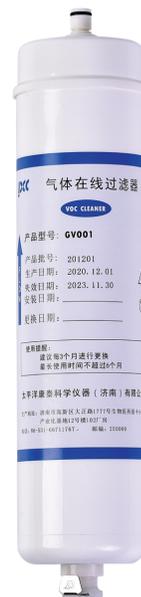

## PCC<sup>®</sup> 气体在线过滤器支架

### 适用范围：

将PCC<sup>®</sup>气体在线过滤器固定于墙面或培养箱侧面。



## PCC<sup>®</sup> 气体在线过滤器接头

### 适用范围：

连接在PCC<sup>®</sup>气体在线过滤器与供气管道之间的安全固定接头。



## PRODUCT PARAMETER

产品编号	产品名称	包装
GV001	PCC <sup>®</sup> 气体在线过滤器	1个/盒，独立真空无菌包装
QG1001	PCC <sup>®</sup> 气体在线过滤器接头	1对/包
QG1002	PCC <sup>®</sup> 气体在线过滤器支架	1个/盒



## 使用说明：

- 1.使用之前取下气体在线过滤器两端的保护帽,检查外观,确保气体在线过滤器以及各部分配件之间完好无损。
- 2.如图所示：将公接头连接到气体在线过滤器的进气端,气体在线过滤器的出气端连接到母接头上,连接时会发出清脆的连接声,管路连接处分别卡上卡箍,并卡紧。
- 3.接通气源，使用时确保各管路无过度弯折情况,防止管路超压。

## 注意事项：

建议每3个月进行更换；最长使用时间不超过6个月。

